

Spirit CK-112

SINCE 1976

aneroidni aparat za merenje krvnog pritiska

Uputstvo za upotrebu

Zahvaljujemo Vam na kupovini našeg visokokvalitetnog aparata za merenje krvnog pritiska. Najbolji materijali i stroga kontrola kvaliteta prilikom izrade garantuju preciznost prilikom dijagnostičkih procedura. Aparat je dizajniran da uz pravilno održavanje radi pouzdano dugi niz godina.

U uputstvu koji sledi navešćemo nekoliko saveta uz pomoć kojih ćete moći da najbolje iskoristite aparat u Vašem radu. Molimo Vas da pročitate uputstvo za upotrebu i da ga sačuvate kao podsetnik.

1. Delovi instrumenta


Ovaj aneroidni aparat za merenje krvnog pritiska se sastoji od tela aparata i sistema za naduvavanje.

2. Merenje


Krvni pritisak nastaje cirkulacijom telesne krvi. Sistolni krvni pritisak je pritisak ispumpavanja krvi iz srca, čime krv putem arterija stiže u celo telo. Kada se srce opušta, krv se vraća u njega. Pritisak koji se tada vrši predstavlja dijastolni krvni pritisak.

3. Procedura merenja

- Pacijent treba da bude lagano obučen, da duboko udahne nekoliko puta i da se opusti.
- Pacijent treba da udobno sedi ili leži. Ruka na kojoj se meri pritisak mora biti na stolu i u nivou srca (kao na ilustraciji dole). Sto i stolica moraju biti odgovarajuće visine.

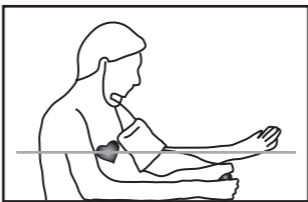

- Opipajte položaj leve arterije. Postavite manžetnu oko nadlaktice, 2-3 centimetra iznad prevoja lakta. Manžetna ne sme da bude previše labavo, niti previše tesno postavljena.

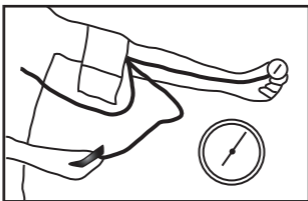

- d) Postavite zvono stetoskopa na unutrašnju stranu pregiba lakta, nešto ispod donje ivice manžetne. Na ovaj način detektujemo zvuke koji određuju sistolni i dijastolni krvni pritisak.
- e) Naduvajte manžetnu koristeći gumenu pumpicu. Pre toga proverite da li je ventil za ispuštanje vazduha zatvoren.
- f) Polako otvorite ventil za ispuštanje vazduha tako da se pritisak u manžetni smanjuje za 2-3 podeoka u sekundi.
- g) Zabeležite pojavu zvuka (sistolni pritisak) i njegov nestanak (dijastolni pritisak).
- h) Po završetku merenja, pritisnite dugme za ispuštanje vazduha koje se nalazi na vrhu ventila da isпустite preostali vazduh iz manžetne. Skinite manžetnu sa nadlaktice.

Čuvanje i održavanje

Nakon upotrebe, obmotajte manžetnu oko pumpice, a potom je odložite u deo predviđen za odlaganje.

CE 0434



34000 Kragujevac, Kumanovska 8

Telefon: (0800) 200 000 (besplatan poziv),

(034) 330 200; Faks: (034) 336 147

E-mail: prizma@prizma.co.rs • www.prizma.co.rs

Predstavništva:

11000 Beograd, Pop Lukina 12; Telefon: (011) 32 86 555

21000 Novi Sad, Šafarikova 9; Telefon: (021) 66 10 718

24000 Subotica, Rudić 3; Telefon: (024) 552 926

18000 Niš, Svetozara Markovića 1; Telefon: (018) 255 770

36000 Kraljevo, Cara Lazara 46; Telefon: (036) 234 500

78000 Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 103; Telefon: (051) 212 437

85330 Kotor, Nativa, Dobrota bb, Telefon: (032) 330 835