

Poštovani korisniče,



Hvala Vam što ste kupili ovaj PRIZMIN uređaj. Pročitajte pažljivo uputstvo za upotrebu pre upotrebe inhalatora da bi ga koristili bezbedno i ispravno. Molimo Vas da Vam uputstvo uvek bude pri ruci.

Uvek ga koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu.

*Sa prijateljskim pozdravima,  
PRIZMA, Kragujevac*

## SADRŽAJ

### OBAVEZNO PROČITATI

Izuzeci od odgovornosti .....	4
Bezbednosne napomene .....	5

### OPIS PROIZVODA

Princip rada .....	9
Osobine proizvoda .....	10
Sastavni delovi proizvoda .....	11

### MONTAŽA

Montaža .....	12
---------------	----

### KORIŠĆENJE PROIZVODA

Priprema za inhalaciju .....	14
Kako se inhalirati .....	15
Završetak inhalacije .....	18

### ODRŽAVANJE PROIZVODA

Održavanje proizvoda .....	19
Čišćenje .....	19
Skladištenje .....	25

### PROBLEMI U RADU

Problemi u radu .....	26
-----------------------	----

### SPECIFIKACIJE

Specifikacije .....	27
---------------------	----

**Pregled izmena**

Ime dokumenta:	Revizija:	Datum:	Razlog izmene:
PRIZSALT uputstvo za upotrebu	Rev 01-00		Početno izdanje
PRIZSALT s00 naslovna	Rev 01-00		Početno izdanje
PRIZSALT s01 sadržaj	Rev 01-00		Početno izdanje
PRIZSALT s02 pregled izmena	Rev 01-01		Promena na mehaničkim delovima
PRIZSALT s03 obavezno pročitati	Rev 01-00		Početno izdanje
PRIZSALT s04 opis proizvoda	Rev 01-01		Promena na mehaničkim delovima
PRIZSALT s05 montaža	Rev 01-01		Promena na mehaničkim delovima
PRIZSALT s06 korišćenje proizvoda	Rev 01-01		Promena na mehaničkim delovima
PRIZSALT s07 održavanje proizvoda	Rev 01-01		Promena na mehaničkim delovima
PRIZSALT s08 problemi u radu	Rev 01-01		Promena na mehaničkim delovima
PRIZSALT s09 specifikacije	Rev 01-01		Promena na mehaničkim delovima

## Izuzeci od odgovornosti



### ***Molimo Vas da razumete da PRIZMA nije odgovorna u sledećim slučajevima:***

1. Problemi ili šteta nastala održavanjem ili servisiranjem uređaja koje nije izvršila PRIZMA ili PRIZMINI ovlašćeni distributeri.
2. Problemi ili šteta nastala zbog upotrebe proizvoda i materijala koje nije isporučila PRIZMA.
3. Problemi ili šteta nastala ako se pri održavanju ili servisiranju koriste rezervni delovi koje nije odobrila PRIZMA.
4. Problemi ili šteta nastala zato što korisnik uređaja nije pročitao ili se nije pridržavao upozorenja o bezbednosti i uputa za korišćenje uređaja navedenih u ovom uputstvu.
5. Problemi ili šteta nastala zbog odstupanja radnih uslova od onih navedenih u ovom uputstvu, uključujući i napajanje i uslove okoline u kojoj je instaliran uređaj.
6. Problemi ili šteta nastala zbog nestručnih izmena na uređaju ili zbog nestručne popravke uređaja.
7. Problemi ili šteta nastala zbog više sile, kao što su požar, zemljotres, poplava ili udar groma.

1. Sadržaj ovog uputstva podložan je promenama zbog poboljšanja, bez prethodnog upozorenja.
2. Sadržaj uputstva pažljivo je pripreman i proveravan. Ipak, ako pronađete neku grešku molimo Vas da o tome obavestite lokalnog predstavnika ili distributera PRIZME.
3. Zabranjeno je bez dozvole PRIZME kopirati ovo uputstvo u celini ili delimično. Ako niste korisnik uređaja koji ga koristi za svoje lične (službene) potrebe, u skladu sa Zakonom o autorskim pravima nije Vam dozvoljeno korišćenje ovog uputstva.

## Bezbednosne napomene

- Znaci upozorenja i primeri simbola prikazani ovde navedeni su kako bi ovaj proizvod bezbedno i ispravno koristili i smanjili rizik od povreda.
- Izgledi simbola i njihovo značenja su:

Znak upozorenja	Značenje
 <b>Upozorenje</b>	Ukazuje na mogućnost nastupanja smrti ili opasne telesne povrede usled nepoštovanja uputstva.
 <b>Oprez</b>	Ukazuje na mogućnost nastanka telesne povrede ili materijalne štete* usled nepoštovanja uputstva.

\* Pod materijalnom štetom podrazumeva se širok opseg šteta na kući, pokućstvu, domaćim životinjama i ljubimcima.

Primeri znakova		
Znak  ukazuje da treba obratiti pažnju (uključujući upozorenja i opasnosti). Objašnjenje razloga za upozorenje nalazi se u tekstu ili slikama pored  .	 Znak "opasnost od požara".	 Znak "opasnost od strujnog udara".
Znak  ukazuje na zabrane (ono što ne smete da uradite). Objašnjenje razloga za zabranu nalazi se u tekstu ili slikama pored  .	 Znak "zabranjeno rasklapanje".	 Znak "opšta zabrana".
Znak  označava nešto što treba proveriti (ili stalno treba imati u vidu). Objašnjenje razloga za upozorenje nalazi se u tekstu ili slikama pored  .	 Znak "opšte upozorenje".	 Znak "isključite napojni kabl".

### Upozorenje

Koristite samo soli odobrene za upotrebu u medicinske svrhe, prema uputstvima lekara.

- Možete pogoršati zdravstveno stanje pacijenta.

Konsultujte se sa lekarom da li tretman ovim uređajem može da dovede do pogoršanja vašeg zdravstvenog stanja.

- Možete pogoršati zdravstveno stanje pacijenta.

Svaki put posle upotrebe pažljivo očistite uređaj.

- U uređaju se tokom rada taloži so koja je veoma korozivna. Može doći do korozije i propadanja pojedinih delova uređaja.

U slučaju bilo kakvog problema sa Vašim inhalatorom molimo Vas da stupite u vezu sa Vašim lokalnim servisom PRIZME (adresa je na pakovanju ili unutar njega).



**Bezbednosne napomene****⚠ Upozorenje**

Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih gasova ili u zonama sa visokim rizikom od eksplozije.

Dozvoljeno je raspršivanje samo soli.

Ne rasklapajte uređaj dok je priključen na električnu mrežu.

• Možete doživeti strujni udar ili se povrediti.



Ne uključujte i ne isključujte kabl za napajanje iz električne mreže ako su vam mokre ruke.

• Možete doživeti strujni udar ili se povrediti.



Ne perite uređaj vodom, ne prskajte uređaj vodom.

• U uređaju može nastati kratak spoj ili možete doživeti strujni udar.

**⚠ Oprez**

Uređaj je namenjen samo za inhalaciju suvom soli.

• Ako se pokuša inhalacija drugim materijama, može doći do oštećenja delova uređaja ili do nepravilnog rada uređaja.

Ako su delovi uređaja već bili zaprljani pre korišćenja, očistite ih pre upotrebe.

• Ako u uređaju ima zaostale soli, može doći do pogoršanja karakteristika rada uređaja.

Odlaganje na otpad ovog uređaja treba obaviti u skladu sa nacionalnim propisima za deponovanje elektronskih uređaja.



## Bezbednosne napomene

### Oprez

Ako se uređaj duže vreme neće koristiti, proverite da li je kabl za napajanje izvučen iz električne mreže.

- Možete doživeti strujni udar ili uređaj može da se zapali zbog curenja struje.

Proverite da li je uređaj isključen i da li je kabl za napajanje izvučen iz električne mreže tokom instalacije, premeštanja ili održavanja uređaja.

- Možete doživeti strujni udar ili se povrediti.



Ne gledajte u otvor iz koga izlazi aerosol.

- Velika količina soli može dospeti u oči i izazvati povrede.

Ne punitite rezervoar nikakvim materijama, osim suvom soli za medicinsku upotrebu.

- Može doći do pogoršanja karakteristika ili oštećenja uređaja.

Ne koristite kabl za napajanje ako je oštećen, niti priključujte kabl u lošu električnu utičnicu.

- Možete doživeti strujni udar, može doći do kratkog spoja u uređaju ili do njegovog zapaljenja.



Ne grebite, ne trljajte, ne popravljajte, ne previjajte, ne vucite, ne uvijajte kabl za napajanje. Ne stavljajte teške predmete preko kabla za napajanje. Držite kabl za napajanje podalje od toplih ili vrućih predmeta.

- Možete doživeti strujni udar ili može doći do paljenja uređaja zbog kratkog spoja izazvanog pogoršanjem izolacije kabla za napajanje.

Ne rasklapajte, ne popravljajte i ne vršite nikakve izmene na uređaju.

- Uređaj može da se pokvari ili može izazvati povrede.

Uspostavite vezu sa najbližim servisom PRIZME.



Ne koristite kabl za napajanje drugačiji od isporučenog.

- Uređaj može da se upali ili možete doživeti strujni udar.

Proverite da li napon napajanja odgovara naponu navedenom u specifikacijama uređaja.

- Uređaj može da se upali ili možete doživeti strujni udar.

Ne priključujte više uređaja na jednu mrežnu utičnicu za napajanje.

- Uređaj može da se upali ili možete doživeti strujni udar.



Kada isključujete kabl za napajanje iz električne mreže ne vucite kabl, nego rukom uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice.

- Može doći do prekida ili kratkog spoja u kablju za napajanje. Oni mogu izazvati požar ili možete doživeti strujni udar.

## Bezbednosne napomene

### Opšta uputstva

Ne koristiti uređaj za druge svrhe, osim inhalacije.

Ne koristiti delove i dodatke osim onih navedenih u ovom uputstvu.

Ne sipati u posudu dozatora više od 150g soli.

Ne blokirati otvore za ventilaciju vazduha na donjoj strani inhalatora.

Ne vršiti inhalaciju ako je deflektor skinut sa izlazne cevi uređaja.

• Velika količina soli može doći u dodir sa licem i očima.

Posle čišćenja delova, delovi treba da se potpuno osuše pre sklapanja.

Ne brisati telo uređaja isparljivim hemikalijama, kao što su benzin i razređivači.

Iako inhalator zadovoljava propise o EMC (elektromagnetska kompatibilnost), treba izbegavati njegovu upotrebu u neposrednoj blizini ostalih električnih uređaja.

Ne dozvoliti da uređaj bez nadzora koriste deca ili nesamostalne osobe.

## Održavanje

Pre upotrebe uređaja proveriti da li on radi normalno i bezbedno.

### Šta raditi u slučaju kvara ili akcidenta


U slučaju kvara odmah postupiti na sledeći način:

- 1) Isključiti uređaj i izvaditi kabl za napajanje iz električne mreže.
- 2) Staviti natpis "Neispravan - ne koristiti" na komandni orman i orman halogeneratora.
- 3) Stupiti u vezu sa prodavnicom u kojoj ste kupili uređaj ili sa najbližim predstavnikom PRIZME.

## Opis proizvoda

### Princip rada

- 1) Dozator u programiranom ritmu ispušta male količine soli iz rezervoara u mlin.
- 2) Mlin usitnjava so i pravi od nje čestice slane prašine različite veličine, od nekoliko mikrona do delova milimetra.
- 3) Struja vazduha ventilatora izvlači iz mlina čestice koje su dovoljno male i lake i izbacuje ih kroz izlazni otvor uređaja.
- 4) Vazduh na izlazu uređaja udara u deflektor. Krupne i teške čestice soli nisu u stanju da prate naglu promenu smera strujanja vazduha, udaraju u deflektor i padaju na zemlju. Sitne i lake čestice soli mogu da prate tok vazduha iz ventilatora, zaobilaze ploču deflektora i dospevaju u vazduh u slanoj sobi.

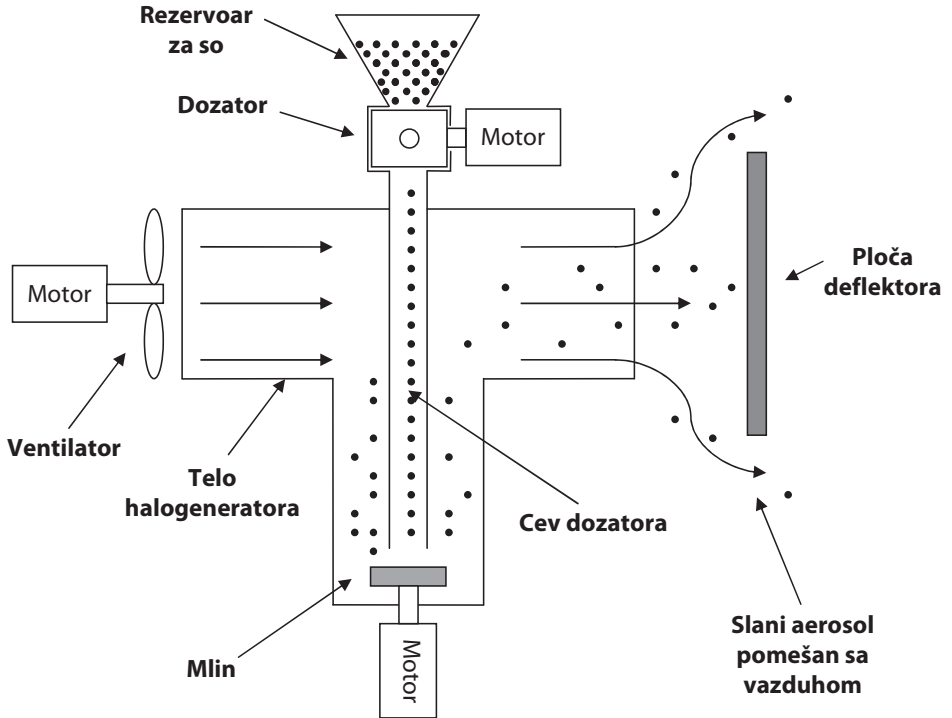

## Opis proizvoda


### Bitne osobine proizvoda

1. Uređaj se sastoji od halogeneratora i komandnog ormana. Halogenerator i komandni orman spojeni su komandnim kablom. Kabl za napajanje nalazi se na komandnom ormanu.
2. Uređaj ima velik LCD ekran na kome se prikazuje trajanje inhalacije, broj izabranog programa rada, profil doziranja soli tokom trajanja inhalacije, vreme do kraja inhalacije i greške u toku rada. Pozadinsko osvetljenje ekrana omogućava čitanje i u mraku.
3. Preko ekrana nalazi se površina osetljiva na dodir. Na taj način omogućen je jednostavan interaktivan rad sa uređajem. U uređaj je ugrađena zujalica koja se oglašava kratkim tonom kada korisnik pritisne neku od komandi na ekranu.
4. Uređaj se oglašava karakterističnim tonovima po isteku vremena za inhalaciju ili u slučaju nekih problema u toku rada uređaja.

## Opis proizvoda

### Sastavni delovi proizvoda

#### Halogenerator

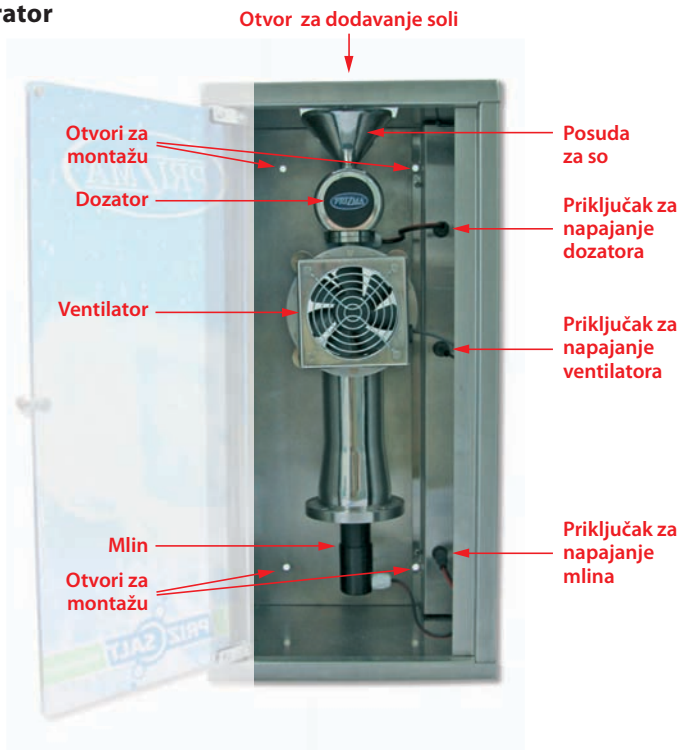

#### Komandni orman




Halogenerator i kontrolni orman su povezani komandnim kablom. Komandni kabl ide od komandnog ormara i treba da se uključi u utičnicu na bočnoj strani halogeneratora.


# Montaža

## Montaža

1. Na spoljnoj površini zida slane sobe naznače se pozicije rupa za halogenerator kao na slici:

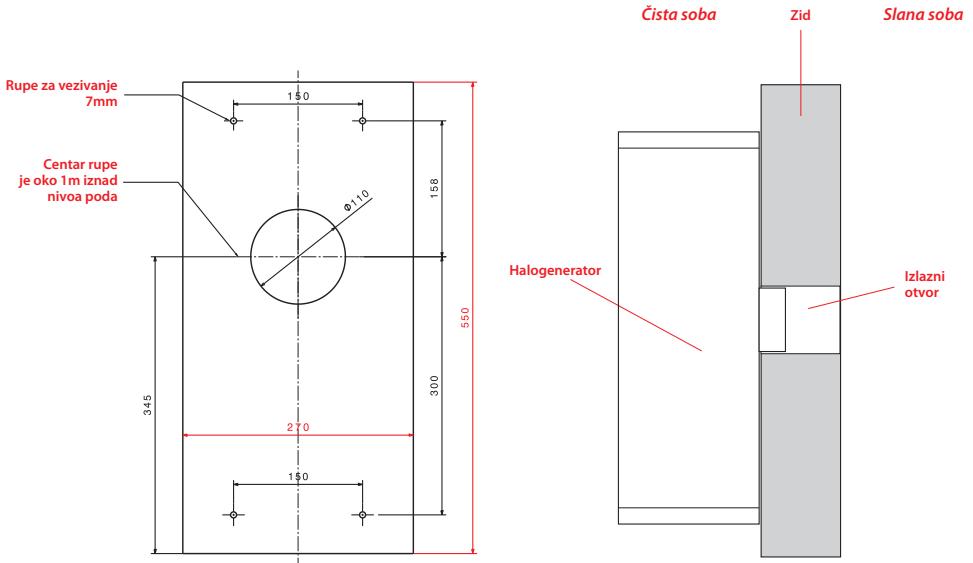

2. Probušiti u zidu rupu prečnika 110 mm za izlazni otvor.
3. Zabušiti u zidu 4 rupe od 8 mm prečnika za tiplove i ubaciti ih u rupe.
4. Postaviti halogenerator na pripremljen zid i zašrafiti 4 metalna zavrtnja 5.5 x 60 mm - DIN7997 u tiplove.
5. Na spoljnom zidu slane sobe označiti centre rupa za komandni orman prema slici:

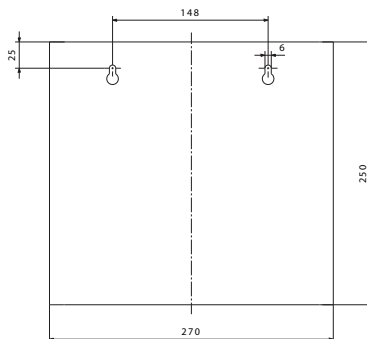

## Montaža

6. Zabušiti u zidu dve rupe prečnika 8 mm za tiplove i ubaci ih u rupe.
7. Zašrafiti dva metalna zavrtnja 5.5 x 60 mm - DIN9997 u tiplove tako da 5 mm zavrtnja viri van zida.
8. Okačiti komandni orman na ova dva zavrtnja.
9. Priključiti komandni kabl za komandni orman.



10. Priključiti komandni kabl za halogenerator.



11. Ubaciti kabl za napajanje u konektor na komandnom ormanu i priključiti ga na uzemljenu utičnicu.



## Priprema za inhalaciju

### 1. Dodavanje soli.

Skinuti poklopac halogeneratora.



Pripremiti so za upotrebu. Da bi uređaj korektno radio, so mora biti suva.

Ukoliko je so vlažna, neophodno ju je pre sipanja u rezervoar za so zagrejati 5-10 minuta na 80°C kako bi se oslobodila apsorbirane vode.

U rezervoar za so sipajte so za inhalaciju. Maksimalna količina soli koja se može sipati odjednom u dozator je 150g.



### 2. Uključivanje uređaja.

Zatvoriti vrata halogeneratora.




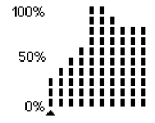




Uključiti prekidač (pozicija 1). Na ekranu komandnog ormana će tokom par sekundi biti prikazana uvodna stranica. Posle toga na ekranu će biti prikazana osnovna stranica.




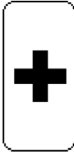

## Kako se inhalirati

Uređajem se upravlja pritiskom prsta na sličice prikazane na LCD ekranu. Ako se LCD ekran pritisne na mestu gde je nacrtana komanda, uređaj će se oglasiti kratkim zvučnim signalom. Na taj način korisnik ima bolji osećaj kontrole uređaja.





**Napomena:** Da bi Vaš uređaj radio dugo i bez problema, molimo Vas da LCD ekran pritiskate samo jagodicama prstiju. Ne pritiskajte LCD ekran vrhovima noktiju ili nekim tvrdim predmetom (olovka i sl.). Uređaj registruje dva uzastopna pritiska samo ako je između njih razmak veći od 200ms, tj. ne registruje vrlo brze pritiske ekrana.

<i>Opis ikona na LCD ekranu</i>	
Taster za izbor podešavanja trajanja inhalacije. Vreme trajanja inhalacije prikazuje se brojačano sa desne strane tastera.	
Taster za izbor programa inhalacije.	
Tasteri za izbor koraka inhalacije.	
Bar grafikon za prikaz načina doziranja soli tokom inhalacije.	
Taster za izbor podešavanja trenutka početka inhalacije. Brojke pored tastera prikazuju vreme dana ili trenutak početka inhalacije.	
Taster za ulazak na ekran za podešavanja.	
Taster za pokretanje inhalacije.	
Taster za pauziranje inhalacije.	



## Kako se inhalirati

Opis ikona na LCD ekranu	
Taster za prekidanje inhalacije.	
Taster za povećanje vrednosti izabranog parametra.	
Taster za smanjenje vrednosti izabranog parametra.	


### 1. Podešavanje vremena

Inhalator ima časovnik sa baterijom, tako da može da meri dnevno vreme i kada je inhalator isključen. Ako je potrebno podesiti vreme, to se radi pritiskom na taster . Na LCD ekranu će se prikazati nova strana. Pritisnite taster . Posle pritiska taster će promeniti boju u . Vreme se podešava pritiskom na tastere + i -. Ako se tasteri + ili - stalno drže pritisnuti, vreme će samo da se menja. Po završetku podešavanja vremena pritisnuti taster . Na ekranu će se ponovo pojaviti osnovna stranica i u donjem delu ekrana treba da se vidi trenutno vreme.


### 2. Podešavanje trajanja inhalacije


Pritisnuti taster . Posle pritiska taster će promeniti boju u . Pritiskom na tastere + i - treba podesiti trajanje inhalacije. Najduže trajanje inhalacije je 99 minuta. Podešeno vreme trajanja inhalacije prikazuje se sa desne strane tastera.

### 3. Podešavanje programa inhalacije



Dužina terapije i način doziranja soli mogu se sačuvati u jednom od devet programa. Za izbor programa pritisnuti taster . Posle pritiska taster će promeniti boju. Pritiskom na tastere + i - bira se željeni program rada od 1 do 9.

### 4. Podešavanje načina doziranja soli tokom inhalacije

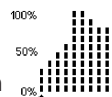


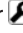

Način doziranja soli tokom inhalacije prikazuje se na bar grafikon . Vreme trajanja inhalacije podeljeno je na 10 jednakih delova. Svakom delu inhalacije odgovara jedna kolona bar grafa. U svakom delu trajanja inhalacije moguće je podesiti količinu soli od 0% do 100% kapaciteta uređaja.



## Kako se inhalirati


Pritisnuti taster  ili . Posle pritiska taster će promeniti boju. Pritiskanjem tastera pomera se kursor ispod bar grafikona za prikaz načina doziranja soli tokom inhalacije. Kursor treba dovesti ispod kolone čija vrednost treba da se promeni. Pritiskom na tastere + i - moguće je podesiti količinu soli od 0% do 100% u koracima po 10%.

### 5. Pokretanje inhalacije

Pritisnuti taster . Terapija će početi ako su vrata halogeneratora zatvorena i mlin nije blokiran. Posle startovanja terapije taster  će promeniti izgled u , i taster  u . Vreme inhalacije počinje da odbrojava. Kada istekne podešeno vreme inhalacije, ona se automatski zaustavlja, uz zvučnu signalizaciju.

U toku inhalacije moguće je naknadno podešavanje količine aerosola. U toku inhalacije nije moguća promena njenog trajanja.

Ako su vrata halogeneratora otvorena ili je mlin blokiran terapija se neće pokrenuti i simboli koje označavaju greške će se pojaviti na ekranu.

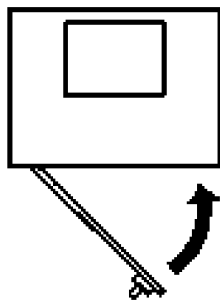



Vrata halogeneratora su otvorena



Mlin je blokiran


Posle ispravljanja grešaka pritisnite taster  i ponovo pokrenite terapiju.

### 6. Pauziranje inhalacije

Inhalacije može da se pauzira pritiskom na taster , koji tada menja izgled u . Prekinuće se stvaranje aerosola i odbrojavanje preostalog vremena do kraja inhalacije.

Inhalacija u svakom trenutku može da se nastavi ponovnim pritiskom na isti taster. Vreme trajanja inhalacije nastavlja da se odbrojava unazad od trenutno zapamćene vrednosti.

### 7. Prekid inhalacije

U svakom trenutku inhalacija može da se prekine pritiskom na taster . Na LCD ekranu uređaja će se prikazati početna strana. Podešene vrednosti protoka vazduha i brzine stvaranja aerosola ostaju na ekranu. Vreme trajanja inhalacije vraća se na početnu vrednost.

## Posle inhalacije

### Posle inhalacije treba:

1. Isključiti mrežni prekidač (postaviti ga u položaj 0).
2. Isključiti kabl za napajanje iz mreže.
3. Očistiti uređaj.

**Napomena:** Neophodno je očistiti mlin posle svake inhalacije. Ako preskočite čišćenje, so nataložena na dozator i mlin će umanjiti efikasnost halogeneratora i koncentraciju slanog aerosola.

*Naslage soli mogu da izazovu kvar ili oštećenje proizvoda.*

*U ekstremnim slučajevima nečišćenja naslaga soli može doći do blokiranja okretanja dozatora, ventilatora ili mlina. U ovim okolnostima moguća su oštećenja delova uređaja (motora dozatora, reduktora dozatora, ventilatora ili motora mlina).*

#### Upozorenje

Pre rasklapanja i čišćenja uređaja obavezno isključiti mrežni prekidač i izvucite utikač iz električne utičnice.

- Možete doživeti strujni udar ili se povrediti.



## Održavanje proizvoda

Nakon terapije, neophodno je očistiti preostalu so iz uređaja.

### Čišćenje proizvoda

Sve delove uređaja treba čistiti mekom suvom tkaninom ili suvom četkicom.

#### Opšte preporuke

- Ne brišite kućište isparljivim tečnostima kao što su benzin ili razređivač.

#### 1. Priprema za čišćenje

Isključiti mrežni prekidač (pozicija 0) koji se nalazi na desnoj stranici komandnog ormara.

Rukom uhvatiti ručicu vrata halogeneratora i otvoriti ih potpuno.



#### 2. Otkaćinjanje priključaka za napajanje

Priključak za napajanje dozatora

Priključak za napajanje ventikatora

Priključak za napajanje mlina



Otkaćite priključke za napajanje dozatora, ventilatora i mlina.



## Održavanje proizvoda

### 3. Čišćenje dozatora

Obrisati preostalu so sa unutrašnje površine rezervoara za so ka dnu rezervoara.



Okretati čep dozatora u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne postane moguće izvući ga iz tela dozatora.



Obrisati so sa svih površina i slepih rupa čepa dozatora.



Obrisati preostalu so unutar dozatora suvom četkicom, ka cevi dozatora.




Uhvatiti telo dozatora rukom.



## Održavanje proizvoda

Blago okrenuti telo dozatora.

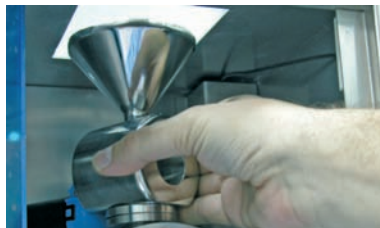

Podići telo dozatora.



Izvaditi dozator iz halogeneratora.



Izbrisati preostalu so iz unutrašnjih površina tela dozatora suvom četkicom.



Obrisati preostalu so sa unutrašnjih površina cevi dozatora dugom suvom četkicom.



## Održavanje proizvoda

### 4. Čišćenje ventilatora

Uхватiti oklop ventilatora rukom.



Blago okrenuti oklop ventilatora.



Izvući oklop ventilatora iz tela inhalatora.



Izbrisati preostalu so sa svih površina ventilatora suvom četkicom.



Izbrisati svu preostalu so sa unutrašnjih površina tela halogeneratora, odnosno unutrašnjih površina horizontalne i vertikalne cevi.



## Održavanje proizvoda

### 5. Čišćenje mlina

Uхватiti prirubnicu mlina rukom.




Blago okrenuti prirubnicu mlina.



Povući mlin na dole.



Izvaditi mlin iz halogeneratora.

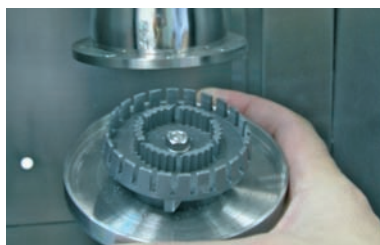

Očistiti so sa svih površina mlina.



## Održavanje proizvoda

Ne zaboravite da očistite sve površine između noža i priрубnice.



Obrišite so sa unutrašnjosti vertikalne cevi korišćenjem duge suve četkice.



Obrišite so nakupljenu na dnu halogeneratora kroz otvore na dnu ormara.






### 6. Sklapanje halogeneratora

Sklopite sve delove halogeneratora obrnutim redosledom od rasklapanja dok ne dođete do početnog stanja halogeneratora.



## Održavanje proizvoda

### Upozorenje

<p>Očišćene navlažene metalne delove treba odmah osušiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Može doći do korozije nekih metalnih delova.</li> </ul> <p>Delove od pleksiglasa ne čistiti organskim rastvaračima (alkohol, aceton, ...).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Može doći do pucanja delova od pleksiglasa.</li> </ul>	
<p>Ne perite kućište uređaja vodom, niti prosipajte vodu na električne vodove i priključke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možete doživeti strujni udar ili može doći do oštećenja inhalatora.</li> </ul>	
<p>Pre čišćenja proverite da li je kabl za napajanje izvučen iz električne mreže.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možete doživeti strujni udar ili može doći do oštećenja uređaja.</li> </ul> <p>Proverite da li se priključak kabla za napajanje može nesmetano izvući iz utičnice u zidu!</p>	

## Skladištenje proizvoda

Ukoliko se ne planira korišćenje uređaja neko vreme:

1. Pažljivo očistiti so iz halogeneratora.
2. Postaviti plastični poklopac preko otvora za dodavanje soli.
3. Zatvoriti halogenerator

## Problemi u radu

<i>Problem</i>	<i>Proveriti</i>	<i>Ispraviti</i>
Displej se ne uključuje.	Da li je kabl za napajanje utaknut u inhalator i električnu mrežu?	Priključiti pravilno kabl za napajanje inhalatora u električnu mrežu.
	Da li je mrežni prekidač u poziciji 1?	Uključiti mrežni prekidač (pozicija 1).
	Da li su dva osigurača, kod glavnog prekidača, pregorela?	Zameniti osigurače.
Uređaj ne stvara aerosol.	Da li u rezervoaru za so ima soli?	Dodati so u posudu za so.
	Da li je priključen kabl za napajanje dozatora?	Priključiti kabl za napajanje dozatora.
	Da li je dozator čist?	Očistiti dozator.
	Da li je priključen kabl za napajanje ventilatora?	Priključiti kabl za napajanje ventilatora.
	Da li je priključen kabl za napajanje mlina?	Priključiti kabl za napajanje mlina.
	Da li je čist nož mlina?	Očistiti nož mlina.
Na ekranu je prikazan simbol "Mlin je blokiran".	Da li su vrata halogeneratora otvorena?	Zatvoriti vrata halogeneratora.
	Proveriti da li ima naslaga soli oko i ispod svih rotirajućih delova mlina.	Koristeći malu četkicu pažljivo očistiti svu so sa noža kao i naslage ispod njega.

- Ako posle navedenih mera uređaj ne proradi normalno, ne rasklapajte uređaj, isključite ga iz električne mreže i obavestite prodavca od koga ste kupili uređaj ili servis PRIZME.

## Specifikacije

### Specifikacije

Ovaj uređaj zadovoljava odredbe EC direktive 93/42/ECC (Direktiva za medicinske uređaje).

<b>Naziv proizvoda</b>	PRIZMA Generator aerosola za inhalaciju suvom solju
<b>Model</b>	PRIZSALT
<b>Klasa proizvoda</b>	Ila - prema 93/42/EEC
<b>Napajanje</b>	100-240 VAC, 50-60Hz
<b>Potrošnja električne energije</b>	55 W
<b>Osigurač</b>	2 x T2AL250V
<b>Klasa električne zaštite</b>	Klasa I
<b>Nivo emisije smetnji</b>	U skladu sa EN 60601-1-2
<b>Potrošnja soli</b>	0 - 150g/h, podesimo
<b>Protok vazduha</b>	Maksimalno 1000 l/min
<b>Kapacitet rezervoara za so</b>	150g
<b>Baterija za časovnik</b>	CR2032, 3V
<b>Spoljne dimenzije halogeneratora</b>	270 (Š) x 550 (V) x 260 (D) mm
<b>Spoljne dimenzije komandnog ormara</b>	270 (Š) x 250 (V) x 150 (D) mm
<b>Ukupna težina</b>	20 kg
<b>Radni uslovi</b>	15 to 40°C (59 to 104°F), 30 to 60% RH
<b>Skladišni i transportni uslovi</b>	-20 to 50°C (-4 to 122°F), 20 to 80% RH
<b>Dodatni pribor</b>	Uputstvo za upotrebu (sa garancijom)

\* Specifikacije i izgled mogu da se promene bez prethodne najave

Simboli:



= Upozorenje: pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu



= Ispravno odlaganje ovog proizvoda

WARNING



= Ne otvarati tokom upotrebe

DO NOT OPEN  
DURING OPERATION

CE 1304

Proizvođač:  
PRIZMA D.O.O.  
Kumanovska 8  
34000 Kragujevac, Serbia



EU predstavnik:  
PHARMED D.O.O.  
Cesta v mestu log 55,  
1000 Ljubljana, Slovenia



